




Dorso Osteo Care 50R20

Ortesi del tronco per il trattamento della Osteoporosi

Principio di funzionamento

L'ortesi Dorso Osteo Care è stata progettata per riportare la colonna vertebrale ad una corretta postura in modo da consentire la mobilità necessaria per svolgere le attività quotidiane.

Grazie ad un sistema di cinture regolabili a sostegno delle spalle, alla compressione esercitata dalla pelotta addominale e ad un telaio dorsale, si ottiene uno spostamento posteriore del baricentro corporeo riducendo così il rischio di cadute e fratture. La respirazione pettorale e quella addominale non vengono ostacolate e viene conferito al paziente maggior sicurezza nei movimenti e nel mantenimento della postura eretta. La struttura muscolare dorsale viene attivata stimolando così l'intero apparato osteoarticolare.

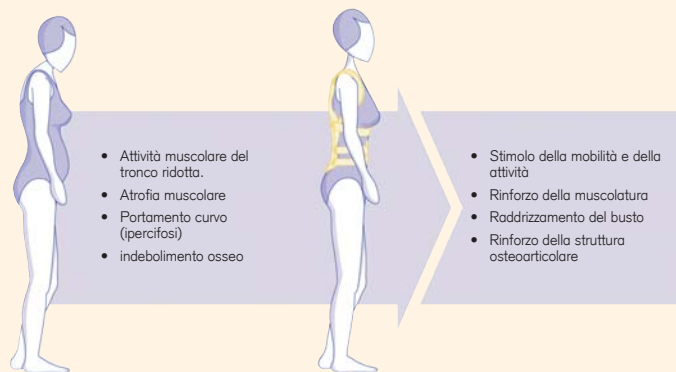

Indicazioni terapeutiche

- Mutamenti dell'assetto osteoporotico nella regione dorsale superiore della colonna vertebrale ed in quella lombare.
- Per il trattamento delle fratture osteoporotiche dei corpi vertebrali.
- Dorso Osteo Care può essere impiegata nelle fasi della Osteoporosi, in cui l'attività muscolare può ancora essere sfruttata e migliorata.

Caratteristiche salienti

- Facile da indossare, (impostazione simile allo zainetto)
- Struttura leggera dal carico quasi impercettibile
- Tessuti traspiranti, morbidi, comodi, non irritano la pelle e sono lavabili.
- Fasce per spalle separate dalla fasce addominali per il mantenimento dell'allineamento ortesi-paziente

Obiettivi della terapia

- Arrestare l'osteoporosi al primo stadio
- Attenuare il dolore
- Conferire mobilità al paziente
- Rinforzare e supportare la muscolatura
- Prevenire fratture

Esempio di piano terapeutico

1° settimana (giorni 1-7)

Mattina: 1 ora
Pomeriggio: 1 ora

3° settimana (giorni 15-21)

Mattina: 1,5 ora
Pomeriggio: 1,5 ora

2° settimana (giorni 8-14)

Mattina: 1,5 ora
Pomeriggio: 1 ora

4° settimana in poi

Mattina: 2 ore
Pomeriggio: 1,5 ora



Trattamento dell'Osteoporosi



50R20 Dorso Osteo Care

- Elevato comfort grazie al materiale di realizzazione altamente traspirante Space Tex®
- Leggera
- Telaio in alluminio modellabile senza l'utilizzo di particolari strumenti
- Si indossa in modo semplice ed immediato, similmente ad uno zainetto
- Completamente sfoderabile
- Fasce per spalle separate dalle fasce addominali per il mantenimento dell'allineamento ortesi-paziente



28R18/28R25 Iperestensore

- Telaio in alluminio smaltato
- Banda pelvica basculante con possibilità di bloccaggio del movimento tramite vite a corredo
- Sistema di chiusura posizionabile su entrambi i lati ed orientabile anteriormente o posteriormente
- Disponibilità di pelotta lombare rettangolare o anatomica e di appoggio pubico



3058 Dosi Cross Dorsolombare

- Supporto dorsolombare composto da un sostegno lombosacrale e da uno dorsale dotato di fasce elastiche a supporto delle spalle.
- Sostegno garantito da due aste in metallo poste nella sezione dorsale
- Materiale per traspirante, Tactel
- Pelotta termica



1068 Reggispalle Dosi EQ

- Supporto per postura con effetto propriocettivo, composto da sezione dorsale e fasce annesse
- Materiale per Tactel, ecologico ed ipoallergenico
- Sostegno garantito da due molle a spirale poste nella sezione dorsale
- Possibilità di utilizzo in combinazione con i supporti lombari Otto Bock

↑
S
T
A
B
I
L
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E
↓

Indicazioni ICF (Codice di Funzionalità Internazionale)		Fratture multiple	Stadio di osteoporosi avanzato	Stadio di osteoporosi iniziale	Prevenzione a fratture	Instabilità della colonna	Processi di decalcificazione	Traumi	Lassità legamentosa	Ipercitosi
28R25		●	●							
50R20				●	●	●				
3058						●	●	●		
1068									●	●

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

Otto Bock Italia S.r.l.u.s.

Vai Filippo Turati, 5/7

40054 Budrio (BO)

Tel. +39 051 692 47 11

Fax +39 051 692 47 33

E-mail: medical.italia@ottobock.com

www.ottobock.it